



ЗАО «ДиаКлон» — российская компания, разрабатывающая и производящая одноразовые стерильные гинекологические медицинские изделия и медицинские перчатки. Компания основана в 1993 году и с момента открытия ориентирована на выпуск продукции высокого качества.

ЗАО «ДиаКлон» — инновационная компания, имеющая всю необходимую инфраструктуру и современное оборудование. Разработка новой продукции ведется в сотрудничестве с ведущими профильными институтами и медицинскими учреждениями. Система менеджмента качества компании сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ISO 13485:2016.

ЗАО «ДиаКлон» — постоянный участник российских и международных медицинских выставок и конференций. Специалисты хорошо знают торговые марки ЗАО «ДиаКлон» и высоко оценивают их качество. На российском рынке наборов для гинекологического осмотра доля продукции компании составляет свыше 25%. ЗАО «ДиаКлон» неоднократно становилось лауреатом программ «Олимп качества», «100 лучших товаров России», «Знак качества XXI век». С 2004 года компания поставляет свою продукцию за рубеж.

ЗАО «ДиаКлон» — единственная в России компания-производитель хирургических «Кольчужных» перчаток, которые защищают руки медицинских работников от случайных порезов. Эти перчатки незаменимы при проведении операций у необследованных пациентов, а также при работе с особо опасными инфекциями (ВИЧ, гепатит В и С).

ЗАО «ДиаКлон» - надежный партнер для тех, кто ценит качество.



- Предназначены для усиленной защиты рук от порезов при работе с пациентами, инфицированными вирусами гепатита В, С и ВИЧ.

Перчатки Кольчужные хирургические защитные синтетические

размеры



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Перчатки следует надевать на руки поверх латексных хирургических перчаток. Поверх перчаток Кольчужных следует также надевать латексные хирургические перчатки.

2. После использования перчатки Кольчужные должны пройти следующие процедуры:

- дезинфекция;
- предстерилизационная очистка;
- сушка;
- проверка перед дальнейшим использованием;
- стерилизация.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Больницы и институты скорой медицинской помощи;
- Станции переливания крови;
- Бюро судмедэкспертизы;
- Патологоанатомическое бюро;
- Инфекционные отделения больниц;
- Родильные дома и другие медицинские учреждения в случаях возникновения риска инфицирования.



Изготовлены из уникального синтетического волокна, что дает минимально возможное снижение чувствительности.

Защищают от порезов, но не защищают от проколов.

Многоразовое использование: выдерживают 12 стерилизаций. Ярлык для контроля количества стерилизаций.

Выпускаются трех размеров: S, M, L.

Размеры определяются по цвету манжеты: S – красный, M – зеленый, L – белый.

Использование моющих и дезинфицирующих растворов (режимы и концентрация), а также стерилизация проводятся согласно МУ-287-113 от 30.12.98 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».

Дезинфекция

Дезинфекция Кольчужных перчаток может проводиться следующими методами: физическими (кипячение или автоклавирование) или химическим (замачивание в дезинфицирующем растворе). При этом целесообразно использовать растворы, обладающие двойной функцией – дезинфицирующей и моющей (например, пероксид, 3% перекись водорода в комплексе с моющим средством, нейтральные анолиты, электрохимически активированный раствор гипохлорита натрия, лизетол АФ, септор-форте, Виркон и др.):

- кипячение в дистиллированной воде при $T=99 \pm 1^\circ\text{C}$, время 30 ± 5 мин;
- автоклавирование (избыт. давление $P=0,05$ МПа ($0,5$ кгс/см²)) в паровом стерилизаторе или дезинфекционной камере при $T=110 \pm 2^\circ\text{C}$, время 20 ± 5 мин;
- замачивание в 3% H_2O_2 + 0,5% «Прогресс», «Астра», «Лотос», «Айна», время 180 мин.;
- замачивание в 0,25% гипохлорите натрия, получаемом электрохимическим методом (например, на установке «УМЭМ-ЭКО» ГП «Кронт»), время 60 мин.;
- замачивание в 2% лизетоле АФ, время 60 мин.;
- замачивание в 0,4% септор-форте, время 90 мин.

После дезинфекции перчатки должны быть промыты в проточной воде до полного удаления запаха дезинфицирующего раствора.

Предстерилизационная очистка

После дезинфекции перчатки подлежат предстерилизационной очистке либо ручным способом путем замачивания в тазе, либо в роторной машине типа стиральной в одном из растворов (Биолот, Биолот-1, Лотос-автомат, ЗИФА, ЛУЧ, NaHCO_3 , католиты и др.):

- замачивание в 3% растворе «Биолота», «Биолота-1», $T=40^\circ\text{C}$, время 15 мин.;
- замачивание в 0,5% растворе «ЗИФЫ»

или «ЛУЧА», $T=50^\circ\text{C}$, время 15 мин.;

- замачивание в 3% растворе « NaHCO_3 », T не менее 18°C , время 15-45 мин.;
- замачивание в католитах без разведения, T не менее 18°C , время 15-45 мин.

Сушка

Перчатки просушить на воздухе или с помощью полотенца.

ВНИМАНИЕ:

Не использовать сушилки с горячим воздухом, т.к. сильные перепады температур могут значительно снизить защитные свойства перчаток.

Проверка перед дальнейшим использованием

Перед дальнейшим использованием Кольчужные перчатки следует проверить на:

- износ и разрыв;
- чрезмерную потерю эластичности;
- износ и/или порезы;
- нарушение рисунка на наружной стороне перчаток;
- нарушение швов.

Процедуру проверки следует проводить каждый раз. Если перчатки не удовлетворяют вышеуказанным критериям, их следует утилизировать.

Не применять перчатки, если они не соответствуют хотя бы одному из критериев проверки. Перчатки относятся к классу В медицинских отходов и должны утилизироваться согласно правилам СанПин 2.1.7.2790-10 – подвергаться дезинфекции.

Стерилизация

Стерилизация проводится автоклавированием в паровом стерилизаторе в режиме:

Температура	121°C	134°C
Время	20 мин	5 мин



Перчатки «ДиаКлиник» медицинские диагностические латексные

размеры



СТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ ВЫПУСКАЮТСЯ ТРЕХ ТИПОВ:


1. Из натурального латекса опудренные;
2. Из натурального латекса неопудренные;
3. Из синтетического латекса неопудренные.

ПЕРЧАТКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ

для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения, для использования в работе с заражёнными медицинскими материалами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Перчатки используются во всех областях медицинской практики

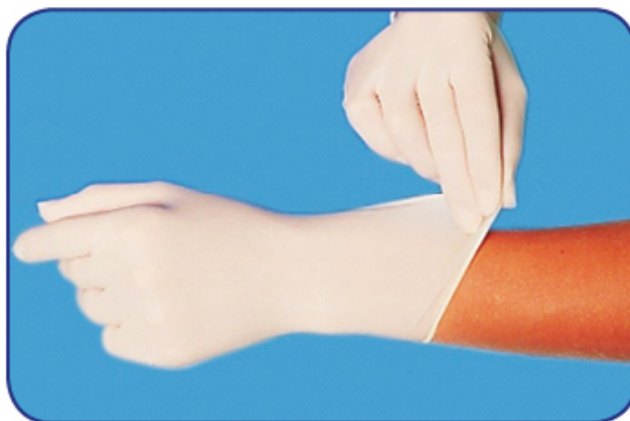

Соответствуют: ГОСТ Р 52239-2004, ТУ 2514-009-18078209-2011.
Неанатомическая форма. Текстурированная или гладкая поверхность.
Длина не менее 240 мм.
Содержание сухого каучукового вещества не менее 60% (для перчаток из натурального латекса).
Содержание протеина в перчатках из натурального латекса не более 200 мкг/г (опудренные) 50 мкг/г (неопудренные).
Содержание пудры не более 200 мг/перчатку (опудренные).
Газовая стерилизация. Наличие укрупненной упаковки по 40 пар.

- Перчатки из синтетического латекса рекомендуются для персонала с повышенной чувствительностью к натуральному латексу.
- Гладкая поверхность перчатки обеспечивает хорошую тактильную чувствительность кончиков пальцев при выполнении стандартных операций.
- Текстурированная поверхность обеспечивает лучшее сцепление руки с инструментом при работе во влажных средах и исключает возникновение световых бликов при операциях под микроскопом (стоматология, офтальмология).
- Неопудренные перчатки предпочтительны к использованию на тех участках операций, где недопустимо попадание пудры на раневую поверхность (офтальмология, микрохирургия и т.д.). При их использовании снижаются риски перекрестного инфицирования и возникновения контактных дерматитов, а в помещении с ограниченной циркуляцией воздуха не накапливаются частички пудры, которые могут вызывать раздражение верхних дыхательных путей и астматические симптомы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. С соблюдением правил асептики перчатки извлекаются из упаковки и одеваются на чисто вымытые сухие руки.
2. Визуально проверяется их целостность.
3. С опудренных перчаток перед использованием следует удалить крахмал влажной стерильной губкой, влажной стерильной салфеткой или другим эффективным методом.
4. После использования перчатки снимаются с рук и помещаются в специальный контейнер для транспортировки использованных медицинских инструментов и материалов.
5. Перчатки следует оберегать от механических повреждений.

Противопоказания

Кожные аллергические заболевания, повышенная чувствительность к латексу (для перчаток, изготовленных из латекса натурального каучука).

ВНИМАНИЕ:



Только для однократного применения.

Примечание

При нарушении целостности упаковки перчатки не применяются. После применения перчатки подлежат дезинфекции и утилизации. Латексные перчатки являются отличным биологическим барьером, но не защищают от агрессивных химических веществ.

Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

Размер	Кол-во в транспортном коробе, пар	Размеры транспортного короба, мм	Вес/кг
S	320	570 x 315 x 185	5,7
M	320		6,0
L	320		6,6

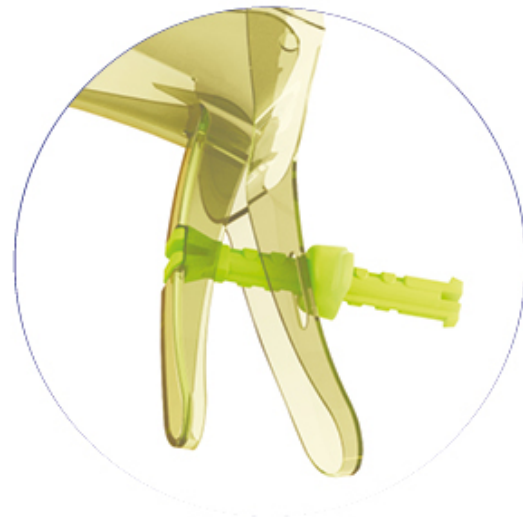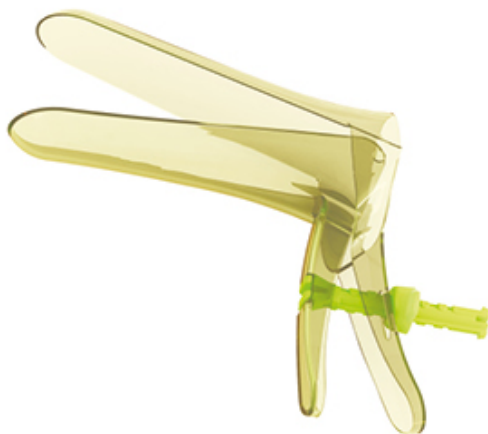

- НОВИНКА! Зеркало нового поколения!

Зеркало по Куско «Золотое» влагалищное полимерное

размеры

M

ЗЕРКАЛО ПРЕДНАЗНАЧЕНО

для расширения влагалища и обнажения шейки матки при осмотре слизистой и проведении гинекологических лечебно-диагностических манипуляций и операций в гинекологических отделениях лечебных учреждений, женских консультациях и кожно-венерологических диспансерах.

- Лечебно-диагностические медицинские центры;
- Санаторно-курортные учреждения гинекологического направления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гинекологические и онкологические отделения в медицинских лечебно-профилактических учреждениях;
- Гинекологические консультации;
- Онкологические диспансеры;



Зеркало по Куско, размер М «Золотое» полимерное прозрачное, универсальное: подходит как для проведения профилактических осмотров, так и для проведения лечебных процедур. Форма створок анатомическая. Упаковка прозрачная.

Дополнительный набор возможностей:

Цвет зеркала – золотистый дает антибликовый эффект: облегчает диагностику рака влагалища и создает возможность для диатермокоагуляции и лазерной терапии. Фиксация с помощью поворотно-винтового устройства «твист-фиксатор» увеличивает скорость приема.

Таблица сопоставления размеров одноразового зеркала по Куско производства ЗАО «ДиаКлон», размер М «золотое» с размерами многоразовых зеркал по Куско.

Зеркало по Куско одноразовое	Длина/ширина створок	Длина/ширина створок	Зеркало по Куско многоразовое
Зеркало по Куско, размер М	112/30 мм	115/30 мм	Зеркало по Куско, № 2

Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Осмотр осуществляется с соблюдением общепринятых правил асептики.
2. Вскройте индивидуальную упаковку с зеркалом.
3. Расположите зеркало с сомкнутыми створками у входа во влагалище.
4. В сомкнутом положении створок введите зеркало во влагалище.
5. Разведите створки на необходимое расстояние.
6. Зафиксируйте замок зеркала. Для этого фиксатор свободно опускается вдоль стержня до любого из уровней и простым поворотом по часовой стрелке зажимается до упора (см. рисунки).
7. При извлечении зеркала последовательность манипуляций обратна последовательности манипуляций при введении зеркала.

Противопоказания

Не применять при вагинальных спазмах (вагинизме).
Не применять при наличии повреждений и дефектов сборки.

ВНИМАНИЕ:

Только для однократного применения.

Примечание

При нарушении целостности упаковки зеркало не применяется.
После применения зеркало подлежит дезинфекции и утилизации.

Закреть замок

повернуть



переместить вниз


Открыть замок

повернуть



переместить вверх

Размер зеркала	Кол-во в транспортном коробе, шт.	Размеры транспортного короба, мм	Вес/кг
М	105	580 x 390 x 230	4,1

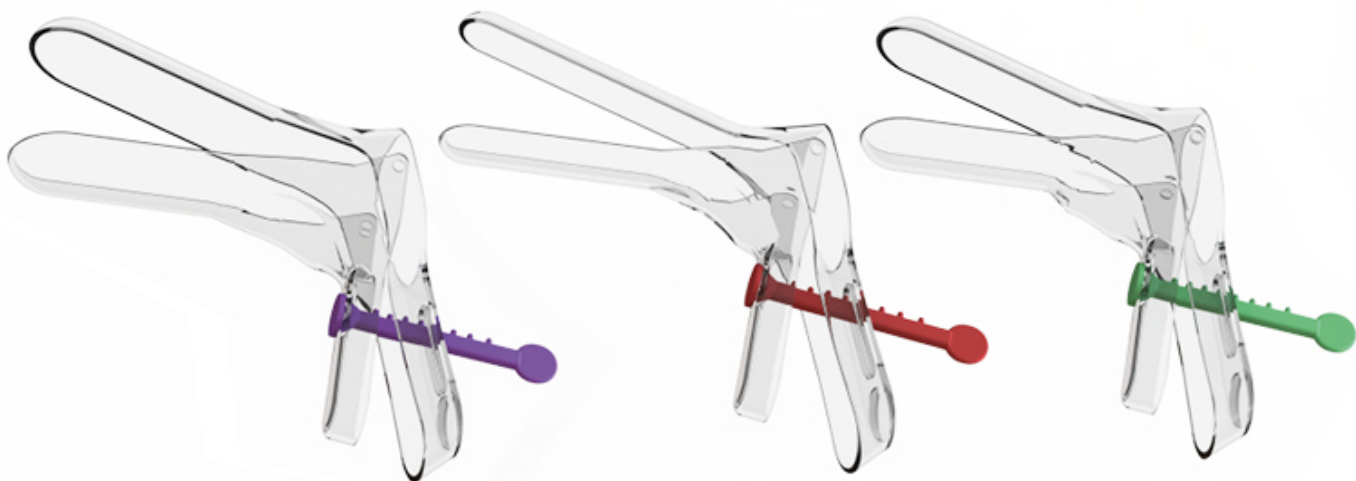

Зеркала по Куско ЗВК «ДиаКлон» влагалищные полимерные

размеры



ВСЕ ЗЕРКАЛА

- Полимерные прозрачные
- Имеют анатомическую форму створок
- Снабжены многоступенчатой системой фиксации с помощью кремальеры
- Упакованы в прозрачную упаковку для определения размера по цвету фиксатора

ЗЕРКАЛО ПРЕДНАЗНАЧЕНО

для расширения влагалища и обнажения шейки матки при осмотре слизистой и проведении гинекологических лечебно-диагностических манипуляций и операций в гинекологических отделениях лечебных учреждений, женских консультациях и кожно-венерологических диспансерах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гинекологические и онкологические отделения в медицинских лечебно-профилактических учреждениях;
- Гинекологические консультации;
- Онкологические диспансеры;
- Лечебно-диагностические медицинские центры;
- Санаторно-курортные учреждения гинекологического направления.



Зеркало по Куско, размер S рекомендуется для проведения осмотров в онкогинекологических отделениях, геронтологических центрах, КВД (стеноз влагалища, изменения после лучевой терапии, возрастные изменения и венерические заболевания), цвет фиксатора – красный.

Зеркало по Куско, размер M рекомендуется как универсальное для проведения профилактических осмотров, цвет фиксатора – зеленый.

Зеркало по Куско, размер L рекомендуется как для проведения профилактических осмотров крупных женщин, так и для проведения малых гинекологических операций и лечебных процедур, цвет фиксатора – сиреневый.

Таблица сопоставления размеров одноразовых зеркал по Куско производства ЗАО «ДиаКлон», размеры S, M, L с размерами многоразовых зеркал по Куско.

Зеркало по Куско одноразовое	Длина/ширина створок	Длина/ширина створок	Зеркало по Куско многоразовое
Зеркало по Куско, размер S	115/19 мм	105/25 мм 115/30 мм	Зеркало по Куско, № 1 Зеркало по Куско, № 2
Зеркало по Куско, размер M	103/26 мм	105/25 мм	Зеркало по Куско, № 1
Зеркало по Куско, размер L	117/30 мм	115/30 мм 125/35 мм	Зеркало по Куско, № 2 Зеркало по Куско, № 3

Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Осмотр осуществляется с соблюдением общепринятых правил асептики.
2. Вскройте индивидуальную упаковку зеркала.
3. Расположите зеркало с сомкнутыми створками у входа во влагалище.
4. В сомкнутом положении створок введите зеркало во влагалище.
5. Разведите створки на необходимое расстояние.
6. Зафиксируйте замок зеркала, повернув фиксатор на 90°.
7. При извлечении зеркала последовательность манипуляций обратна последовательности манипуляций при введении зеркала.

Противопоказания

Не применять при вагинальных спазмах (вагинизме).
Не применять при наличии повреждений и дефектов сборки.
Не применять при гитеросальпингоспии.


ВНИМАНИЕ:

Только для однократного применения.

Примечание

При нарушении целостности упаковки зеркало не применяется.
После применения зеркало подлежит дезинфекции и утилизации.

Размер зеркала	Кол-во в транспортном коробе, шт.	Размеры транспортного короба, мм	Вес/кг
S	105	580 x 390 x 230	3,6
M	105		4,3
L	105		4,4

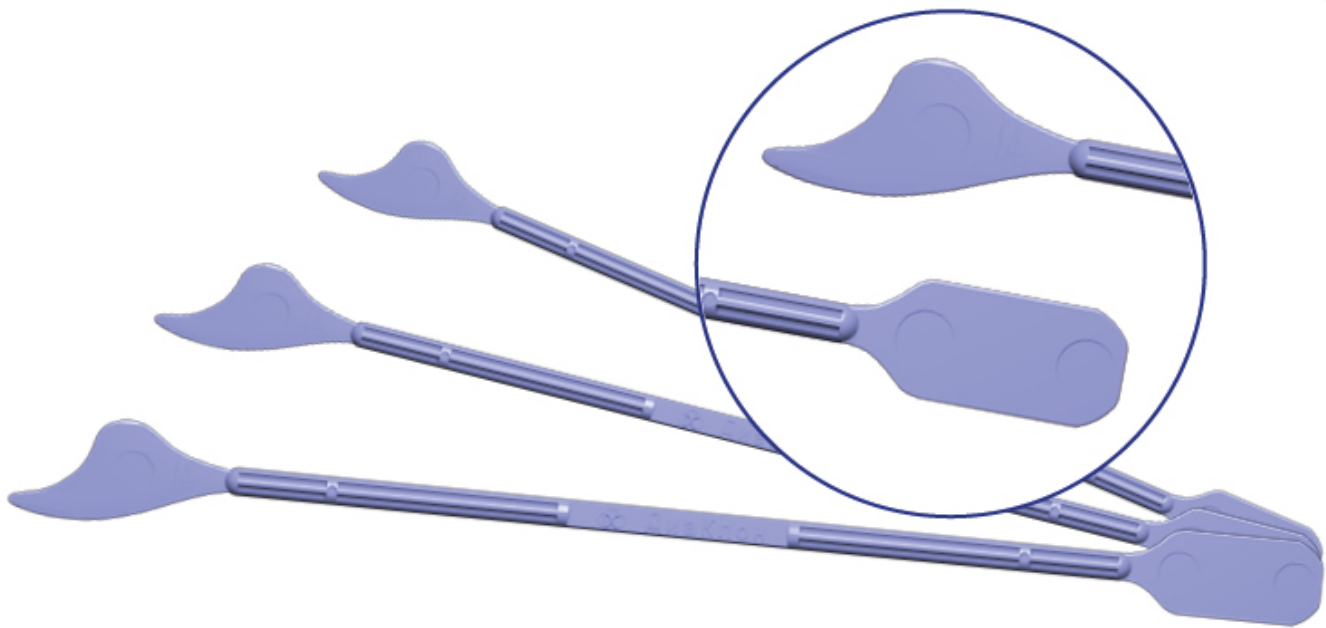

Шпатель ШГ «ДиаКлон» гинекологический полимерный двухсторонний (по Эйру)



ШПАТЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН

для взятия мазков:

- на цитологическое исследование с влагалищной части и канала шейки матки;
- на бактериологическое исследование со слизистой влагалища и шейки матки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гинекологические и онкологические отделения в медицинских лечебно-профилактических учреждениях;
- Гинекологические консультации;
- Онкологические диспансеры;
- Лечебно-диагностические медицинские центры;
- Санаторно-курортные учреждения гинекологического направления.

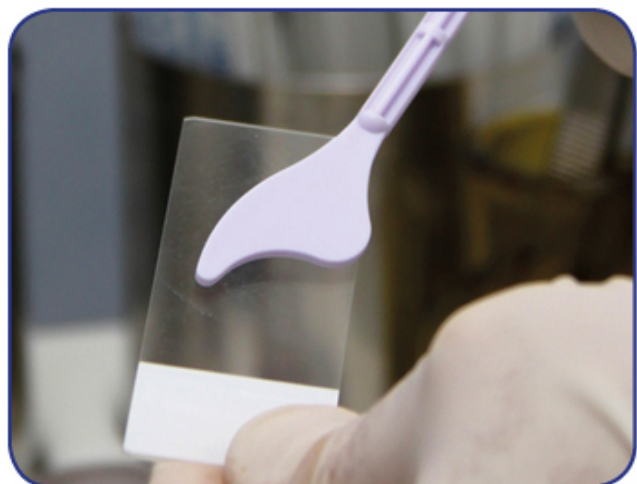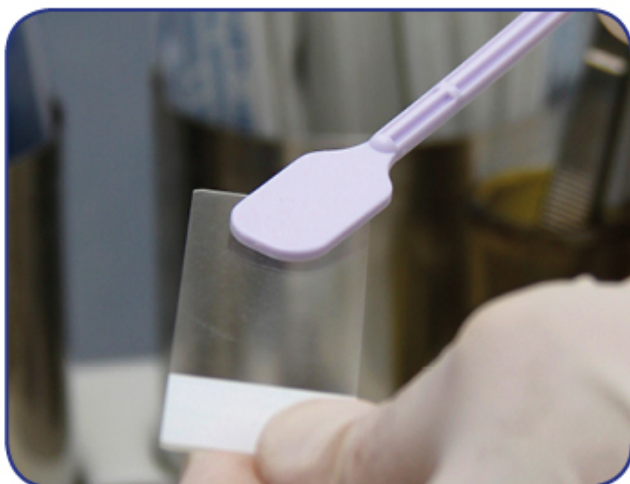

Двухсторонний, длина – 205 мм, цвет сиреневый.
Формы концов специально созданы для облегчения поворота инструмента при заборе мазков и оптимального контакта со слизистой.

Шпатель гинекологический производства ЗАО «ДиаКлон» – классический инструмент для взятия мазков в гинекологической практике.

Инструмент имеет два рабочих конца различной формы: один повторяет контур шейки матки и идеален для отбора материала на цитологическое исследование, другой (в форме лопатки) – для отбора материала со слизистой влагалища и шейки матки на бактериологическое исследование.

Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Осмотр осуществляется с соблюдением общепринятых правил асептики.
2. Вставьте зеркало во влагалище для осмотра шейки матки. Слизь осторожно уберите мягким ватным тампоном путём лёгкого промокания.
3. Вскройте индивидуальную упаковку со шпателем, потянув за свободные концы в верхней части пакета.
4. Шпатель поместите рабочим концом в область наружного зева.
5. После введения прижмите шпатель к поверхности шейки матки и поверните на 360 градусов вокруг наружного зева.
6. Нанесите мазок на предметное стекло лёгким линейным движением вдоль стекла, с использованием обеих поверхностей шпателя. (Следует помнить, что чрезмерное давление на стекло приводит к повреждению клеток).
7. Мазок зафиксируйте на стекле.

Противопоказания

Применять с осторожностью при осмотре беременных.
Не применять при наличии повреждений.


ВНИМАНИЕ:

Только для однократного применения.

Примечание

При нарушении целостности упаковки шпатель не применяется.
После применения шпатель подлежит дезинфекции и утилизации.

Кол-во в транспортном коробе, пар	Размеры транспортного короба, мм	Вес/кг
1000	580 x 390 x 230	6,2

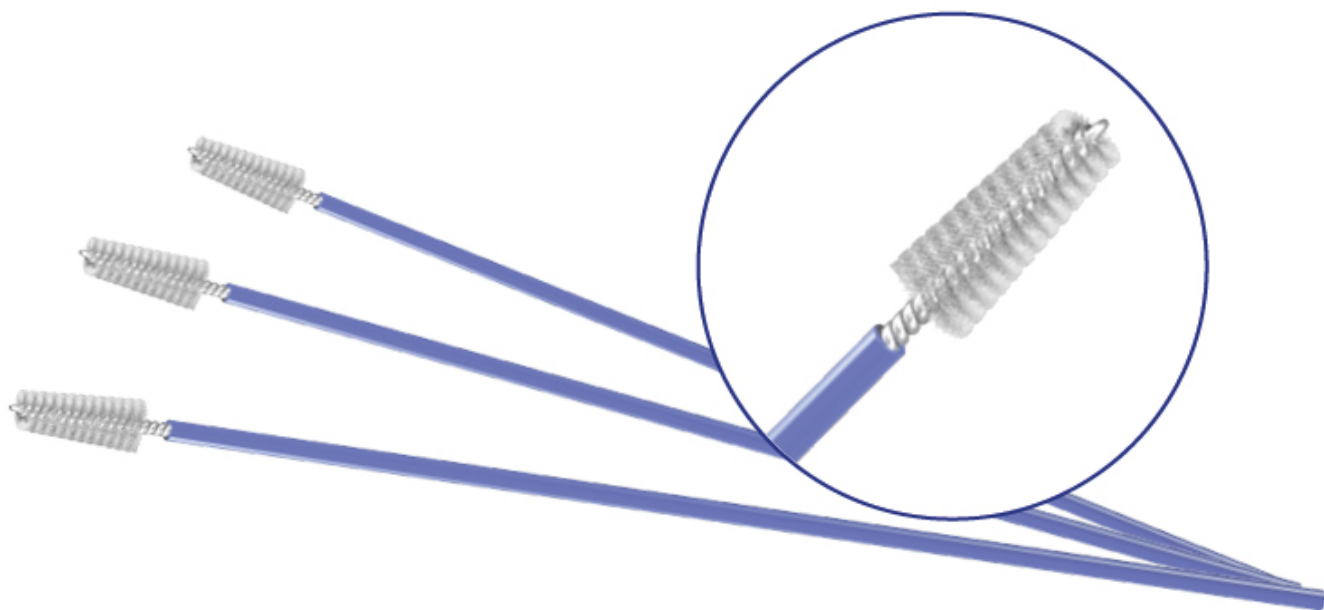


Цитощетка «ДиаТест» гинекологическая для цитологического исследования

ЦИТОЩЕТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА

для взятия мазков на цитологическое исследование из цервикального канала матки (клетки эндоцервикса).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гинекологические и онкологические отделения в медицинских лечебно-профилактических учреждениях;
- Гинекологические консультации;
- Онкологические диспансеры;
- Лечебно-диагностические медицинские центры;
- Санаторно-курортные учреждения гинекологического направления.

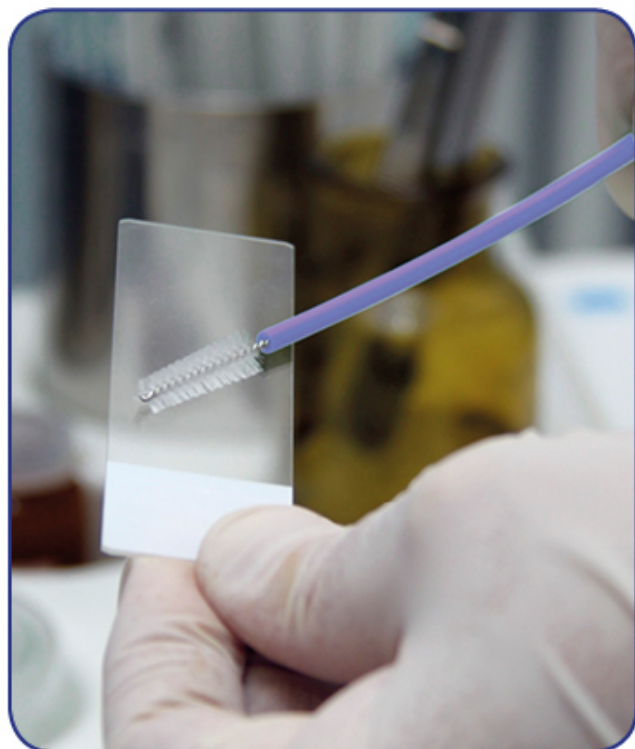

Длина – 200 мм, рабочая часть – 20 мм.

Рабочая часть цитощётки в виде конической щётки со спиральным расположением инертных щетинок изготовлена из стальной проволоки и нейлоновой нити.

Цитощётка имеет атравматичный закругленный конец, исключая риск повреждения тканей.

Лучшей техникой выполнения традиционных онкоцитологических мазков признано использование комбинации шпателя Эйра и эндо-цервикальной цитощётки. Шпатель Эйра предназначен для взятия соскоба со всей поверхности шейки матки. Цитощётка предназначена для взятия соскоба из цервикального канала шейки матки (клетки эндоцервикса). Качество мазков повышается, если первым используется шпатель Эйра, и лишь затем – эндоцервикальная цитощётка, таким образом, уменьшается загрязнение препарата элементами крови. Полученные препараты характеризуются достаточным количеством клеток, адекватно представленным клеточным материалом из зоны стыка эпителия и минимальными артефактами.

Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Осмотр осуществляется с соблюдением общепринятых правил асептики.
2. Вставьте зеркало во влагалище для осмотра шейки матки. Слизь осторожно уберите мягким ватным тампоном путём лёгкого промокания.
2. Вскройте индивидуальную упаковку, потянув за свободные концы в верхней части пакета.
3. Цитощётку осторожно введите в цервикальный канал.
4. После введения конуса цитощётки в цервикальный канал произведите ее поворот на 180 градусов. При стенозе канала только продольное введение без вращения.
5. Цитощётку удалите из влагалища. Нанесите мазок на предметное стекло, "прокатывая" цитощётку вдоль предметного стекла, вращая ручку.
6. Мазок зафиксируйте на стекле.

Противопоказания

Не подлежит использованию во время беременности.
Не применять при наличии повреждений.


ВНИМАНИЕ:

Только для однократного применения.

Примечание

При нарушении целостности упаковки цитощетка не применяется.
После применения цитощетка подлежит дезинфекции и утилизации.

Кол-во в транспортном коробе, пар	Размеры транспортного короба, мм	Вес/кг
1000	580 x 390 x 230	4,3

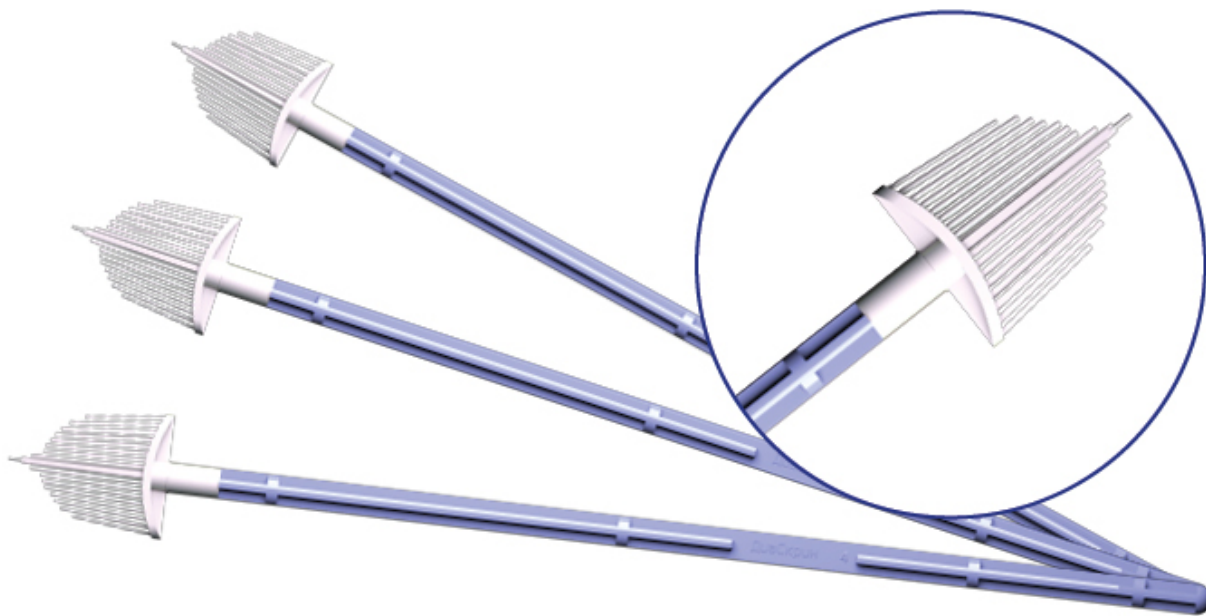

Цервикальная щетка «ДиаСкрин» гинекологическая для цитологического исследования

ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ЩЕТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА

для взятия мазков на цитологическое исследование со всей поверхности шейки матки и из цервикального канала одновременно:

- с наружной части шейки матки (клетки эктоцервикса);
- с зоны трансформации (Т-зоны);
- из цервикального канала (клетки эндоцервикса).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гинекологические и онкологические отделения в медицинских лечебно-профилактических учреждениях;
- Гинекологические консультации;
- Онкологические диспансеры;
- Лечебно-диагностические медицинские центры;
- Санаторно-курортные учреждения гинекологического направления.

Длина – 207 мм, рабочая часть – 28 мм.

Формы концов специально созданы для облегчения поворота инструмента при заборе мазков и оптимального контакта со слизистой.

По форме рабочая часть соответствует контуру шейки матки и представляет собой мягкую и гибкую щёточку из трапециевидных пластиковых щетинок различной длины. Самые длинные средние щетинки захватывают глубокие участки цервикального канала, более короткие щетинки соприкасаются с участками наружной части шейки матки и зоной трансформации.

Гибкость щетинок щёточки позволяет легко собрать клетки со всей поверхности шейки матки и цервикального канала, предотвращая при этом повреждения тканей.

Цервикальная щетка особенно эффективна для цитологического скрининга рака шейки матки. Полученный материал можно не только наносить непосредственно на предметное стекло, но также использовать для жидкостной цитологии.

Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Осмотр осуществляется с соблюдением общепринятых правил асептики.
2. Вставьте зеркало во влагалище для осмотра шейки матки. Слизь осторожно уберите мягким ватным тампоном путём лёгкого промокания.
3. Вскройте индивидуальную упаковку, потянув за свободные концы в верхней части пакета.
4. Цервикальную щётку осторожно введите в цервикальный канал (А).
5. После введения конуса цервикальной щётки в цервикальный канал прижмите ее к поверхности шейки матки и произведите 5 полных круговых движений трижды по часовой стрелке и дважды против часовой стрелки (Б).
6. Цервикальную щётку удалите из влагалища.
7. Нанесите мазок на предметное стекло лёгким линейным движением вдоль стекла с использованием обеих сторон цервикальной щетки (В).
8. Мазок зафиксируйте на стекле или вместе со съемной щеточкой погрузите во флакон с консервирующим раствором для жидкостной цитологии (Г).

Противопоказания

Не подлежит использованию во время беременности.


Не применять при наличии повреждений.

ВНИМАНИЕ:


Только для однократного применения.

Примечание

При нарушении целостности упаковки цервикальная щетка не применяется. После применения цервикальная щетка подлежит дезинфекции и утилизации.

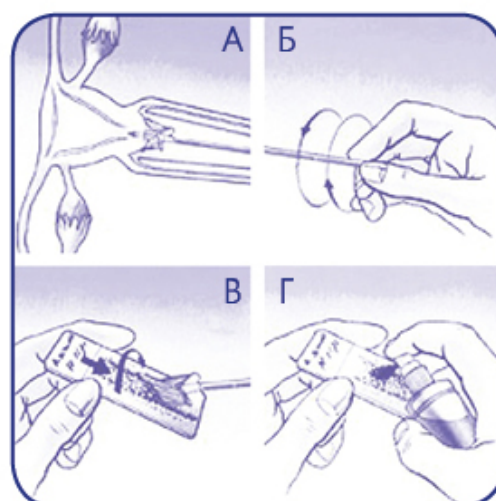

Кол-во в транспортном коробе, пар	Размеры транспортного короба, мм	Вес/кг
1000	580 x 390 x 230	5,7

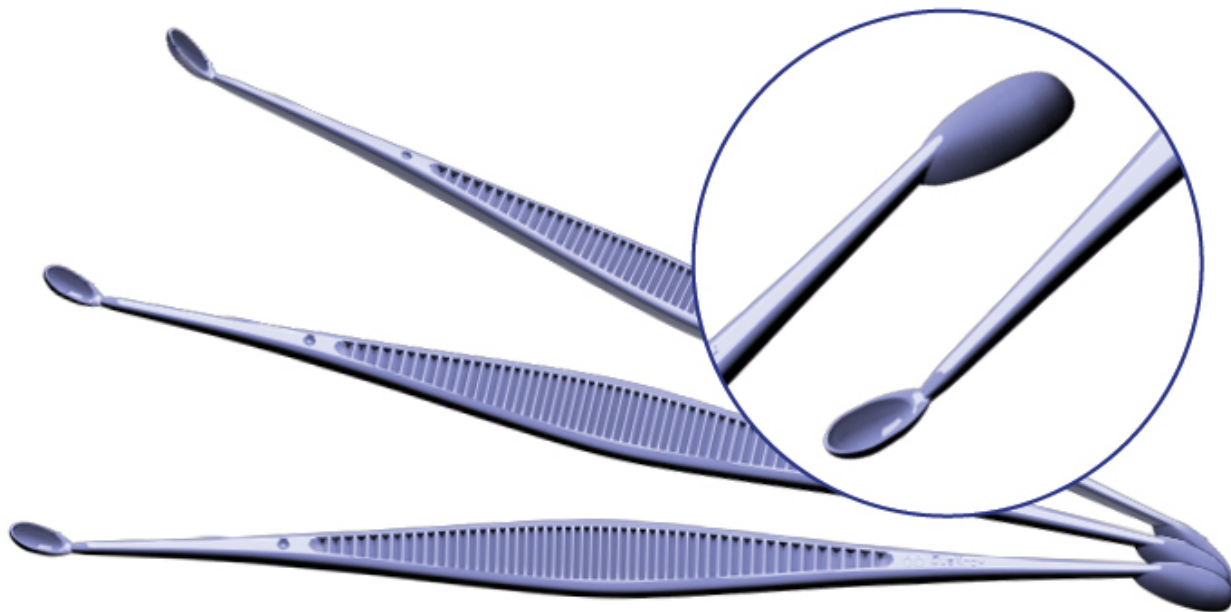


Ложка Фолькмана

ЛОЖКА ФОЛЬКМАНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА

для взятия мазков:
- на бактериологическое исследование
со слизистой влагалища, шейки матки
и уретры.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гинекологические, венерологические и урологические исследования; в медицинских лечебно-профилактических учреждениях;
- Женские консультации;
- Кожно-венерологические диспансеры;
- Лечебно-диагностические медицинские центры.

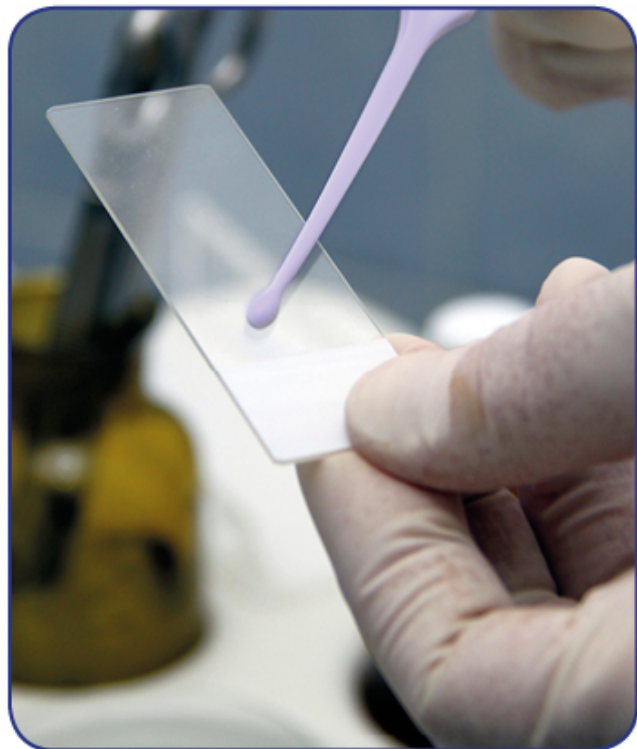

Длина – 211 мм.

Двухсторонний пластмассовый ложкообразный зонд.

Оба конца являются рабочими.

Размер овалов ложек соответственно 3,2 x 7,5 мм и 2,8 x 6,9 мм.

В отличие от других плоских урогенитальных полимерных ложек форма инструмента классическая (3D-модификация):

- Рабочие концы (черпала) развернуты относительно друг друга на угол 180°, что дает возможность без проблем отобрать одну за другой две пробы материала из разных локусов.
- Специальный изгиб чашеобразных концов (черпала расположены под углом 165°-170° к ручке) позволяет легко и быстро отобрать и полностью перенести на предметное стекло или питательную среду пробу материала.
- Наличие градуировки на рабочих концах ручки позволяет контролировать глубину погружения в цервикальный канал.
- Наличие удобной рифленой поверхности на ручке исключает возможность скольжения инструмента в руке специалиста.

Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Осмотр осуществляется с соблюдением общепринятых правил асептики.
2. Вскройте индивидуальную упаковку, потянув за свободные концы в верхней части пакета.
3. Отбор материала произведите с поверхности слизистой влагалища, шейки матки и уретры.
4. Материал нанесите на предметное стекло лёгким линейным движением вдоль стекла.
5. Мазок зафиксируйте на стекле или перенесите материал в питательную среду.

Противопоказания

Применять с осторожностью при осмотре беременных.
Не применять при наличии повреждений.

ВНИМАНИЕ:

Только для однократного применения.

Примечание

При нарушении целостности упаковки ложка Фолькмана не применяется.
После применения ложка Фолькмана подлежит дезинфекции и утилизации.

Кол-во в транспортном коробе, пар	Размеры транспортного короба, мм	Вес/кг
1000	580 x 390 x 230	6,6



Набор изделий «Фемина» для забора отделяемого шейки матки и влагалища

размеры зеркал



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НАБОРА:

- Зеркала влагалищные по Куско;
- Шпатель гинекологический и/или ложка Фолькмана, и/или цитологические щетки, и/или зонды;
- Перчатки смотровые;
- Салфетка (подстилка) размером не менее 45x50 см.;
- Носки-бахилы;
- Стекла предметные.

НАБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН

для проведения профилактических осмотров, лечебных процедур, взятия проб на анализ в условиях женских консультаций, смотровых кабинетов поликлиник, гинекологических и венерологических отделений лечебных учреждений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гинекологические и онкологические отделения в медицинских лечебно-профилактических учреждениях;
- Гинекологические консультации;
- Онкологические диспансеры;
- Лечебно-диагностические медицинские центры;
- Санаторно-курортные учреждения гинекологического направления.

100% защита от инфицирования при осмотре.
Процедура осмотра – легкая и безболезненная.
При большом потоке пациентов позволяет максимально быстро и эффективно производить все необходимые манипуляции.
Набор комплектуется зеркалами трех размеров.
Возможность выбора инструмента для взятия мазка.
Неопудренные перчатки снижают риск возникновения контактного дерматита.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ НАБОРА «ФЕМИНА»

- ШАГ 1:** Выберите размер и тип зеркала в наборе, переходите к Шагу 2. Если зеркало в наборе не нужно, выберите инструмент(ы) для забора отделяемого шейки матки и влагалища (Шаг 2) и предметные стекла (Шаг 3), и Ваш набор «Фемина» (Исполнение 4) готов.
- ШАГ 2:** Добавьте в набор инструмент(ы) для забора отделяемого шейки матки и влагалища, переходите к Шагу 3. Если инструмент в наборе не нужен, Ваш набор «Фемина» (Исполнение 3) готов. Наборы «Фемина» с инструментами: Исполнение 2 и 5.
- ШАГ 3:** Добавьте, если это необходимо, в набор носки-бахилы и/или предметные стекла, и Ваш набор «Фемина» (Исполнение 1) готов.

В таблице на следующей странице показаны возможные варианты набора и их назначение.

Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. С соблюдением правил асептики производится вскрытие общего пакета набора.
2. Извлекаются смотровые перчатки, одноразовая подкладная салфетка и гинекологическое одноразовое зеркало по Куско.
3. Створки зеркала в сомкнутом положении вводятся во влагалище и с помощью фиксатора закрепляются в необходимом положении.
4. С помощью инструмента для забора отделяемого шейки матки и влагалища (шпатель и/или ложка Фолькмана, и/или гинекологические щетки, и/или зонды) производится взятие материала.
5. Работа гинекологическими изделиями по забору материала проводится с использованием смотровых перчаток.

Противопоказания

Применять с осторожностью при осмотре беременных.
Не применять при наличии повреждений и дефектов сборки.

ВНИМАНИЕ:

Только для однократного применения.

Примечание

При нарушении целостности упаковки не применять.
После применения подлежит дезинфекции и утилизации.

Размер зеркала	Кол-во в транспортном коробе, шт.	Размеры транспортного короба, мм	Вес/кг
S	50	580 x 390 x 230	3,25
M	50		3,5
L	50		3,77

ШАГ 1: ЗЕРКАЛО ПО КУСКО В НАБОРЕ

ДА

НЕТ

РАЗМЕР S	Набор подходит для проведения осмотров в онкогинекологических отделениях, геронтологических центрах, КВД (стенноз влагалища, изменения после лучевой терапии, возрастные изменения и венерические заболевания).
РАЗМЕР M	Набор для проведения профилактических осмотров.
РАЗМЕР L	Набор подходит как для проведения профилактических осмотров, так и для проведения проведения малых гинекологических операций и лечебных процедур.
РАЗМЕР M (ЗОЛОТОЕ)	Набор подходит как для проведения профилактических осмотров, так и для проведения лечебных процедур. Золотистый цвет зеркала, создавая антибликовый эффект, облегчает диагностику рака влагалища и создает возможность для АЭК и лазерной терапии.

ИСПОЛНЕНИЕ 4
- инструмент гинекологический полимерный одноразовый для забора отделяемого шейки матки и влагалища (шпатель и/или ложка фольгмана, и/или цитологические щетки, и/или зонды)
СДЕЛАТЬ ВЫБОР, СМ. ШАГ 2.
- стекла предметные.
СДЕЛАТЬ ВЫБОР, СМ. ШАГ 3.

ШАГ 2: ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЗЯТИЯ МАЗКА В НАБОРЕ

ДА

НЕТ

ШПАТЕЛЬ	Набор предназначен для взятия мазков: - на цитологическое исследование с влагалищной части и канала шейки матки, - на бактериологическое исследование со слизистой влагалища и шейки матки.
ЛОЖКА ФОЛЬГМАНА	Набор предназначен для взятия мазков: - на бактериологическое исследование с поверхности слизистой влагалища, цервикального канала и уретры.
ЦИТОЩЕТКА ДИАТЕСТ	Набор предназначен для взятия мазков на цитологическое исследование только из цервикального канала шейки матки (клетки эндоцервикса).
ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ЩЕТКА ДИАСКРИН	Набор предназначен для взятия мазков на цитологическое исследование со всей поверхности шейки матки и из цервикального канала: - с наружной части шейки матки (клетки экзоцервикса), - с зоны трансформации (T-зона), - из цервикального канала (клетки эндоцервикса).
ЗОНА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ	Набор предназначен для взятия мазков: - на бактериологическое исследование из цервикального канала шейки матки и из уретры; - при узком или стенозированном цервикальном канале возможно взятие мазков на цитологическое исследование. Набор может быть использован после конизации шейки матки и во время беременности.

ИСПОЛНЕНИЕ 3
- зеркало одноразовое по Куско ;
- подставка (санфетка);
- перчатки смотровые одноразовые.

ИСПОЛНЕНИЕ 2
- инструмент гинекологический полимерный одноразовый для забора отделяемого шейки матки и влагалища (шпатель и/или ложка фольгмана, и/или цитологические щетки, и/или зонды)
- зеркало одноразовое по Куско;
- подставка (санфетка);
- перчатки смотровые одноразовые.

ИСПОЛНЕНИЕ 5
- инструмент гинекологический полимерный одноразовый для забора отделяемого шейки матки и влагалища (шпатель и/или ложка фольгмана, и/или цитологические щетки, и/или зонды);
- зеркало одноразовое по Куско.

ШАГ 3: НОСКИ-БАХИЛЫ И/ИЛИ СТЕКЛА ПРЕДМЕТНЫЕ В НАБОРЕ

ДА

НЕТ

СТЕКЛА ПРЕДМЕТНЫЕ	Набор содержит инструменты для забора отделяемого шейки матки и влагалища и предназначен для взятия мазков с последующим нанесением на предметное стекло для целей цитологического или бактериологического исследования.
НОСКИ-БАХИЛЫ И СТЕКЛА ПРЕДМЕТНЫЕ	Набор содержит весь комплект гинекологических инструментов и изделий медицинского назначения, необходимых при осмотрах. Набор используется для обслуживания на дому и при проведении осмотров врачами скорой помощи и МЧС.

ИСПОЛНЕНИЕ 2, 3, 5

ИСПОЛНЕНИЕ 4

ИСПОЛНЕНИЕ 1
- инструмент гинекологический полимерный одноразовый для забора отделяемого шейки матки и влагалища (шпатель и/или ложка фольгмана, и/или цитологические щетки, и/или зонды);
- зеркало одноразовое по Куско;
- подставка (санфетка) и/или носки-бахилы одноразовые;
- стекла предметные.

[illegible]

Содержание

О компании	2
Перчатки Кольчужные	3
Перчатки «ДиаКлиник»	5
Зеркало по Куско «Золотое»	7
Зеркала по Куско ЗВК «ДиаКлон»	9
Шпатель ШГ «ДиаКлон»	11
Цитощетка «ДиаТест»	13
Цервикальная щетка «ДиаСкрин»	15
Ложка Фолькмана	17
Набор изделий гинекологических «Фемина»	19
Для заметок	22